


EXIME[®]

TEMPORÄRER PROSTATASTENT

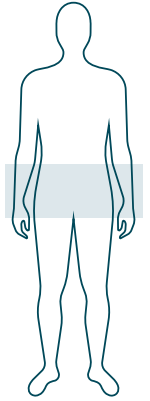

EXIME®

Eine temporäre Lösung für akuten oder chronischen Harnverhalt bei Männern

Bulbärer-Teil

Gerade Röhre aus Silikon

- verhindert Migration
- Fließt in den bulbären Teil der Harnröhre

Auffächerungen auf beiden Seiten des Sphinkters

- verhindert Migration

Verbindungsfaden


- Nicht auflösbar
- Normale Sphinkterfunktion

Prostatistischer Teil

Gewundene Röhre aus Silikon


- Für eine größere Stabilität

SCHRITT 1 Vor dem Einsetzen

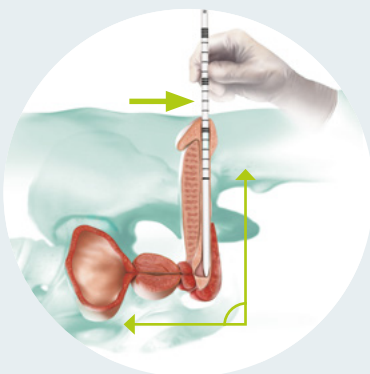


- Den Penis vertikal strecken.
- Die Harnröhre mit einem Anästhesie-Gel tränken und mit dem 22- oder 24-CH-Bougie kalibrieren.
- Den Bougie so weit in die Harnröhre gleiten lassen, bis er an der hinteren Wand der Harnröhre anstößt.
- Die Anschlagtiefe des Bougie mit dem Ring markieren.

SCHRITT 2 Einsetzen des Stents

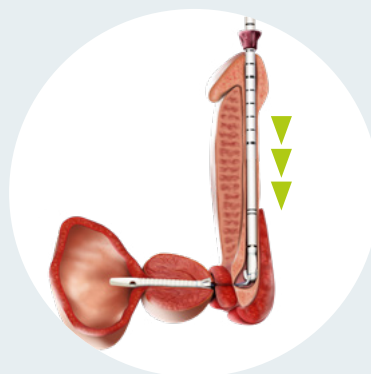

- Den Penis erneut vertikal strecken.
- Den Stent in die Harnröhre gleiten lassen, bis der Schieber an der hinteren Wand der Harnröhre anstößt, und zwar in derselben Tiefe, wie sie mit der Bougie gemessen wurde.

SCHRITT 3 Freigeben des Stents

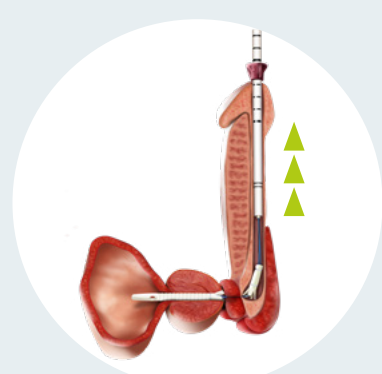

- Den Penis vertikal gestreckt halten.
- Den Mandrin und den Schieber entfernen.
- Leicht an der Naht ziehen, um den Widerstand der Auffächerungen der Röhre, die vor dem Sphinkter eingesetzt werden, zu spüren.
- Den Rückhofaden abschneiden, dabei 10 mm über den Meatus hinausragen lassen.

VORGEHENSWEISE

INDIKATIONEN:

EXIME® ist für die temporäre Anwendung (bis zu 1 Monat) vorgesehen, um bei Männern mit akuter oder chronischer Harnretention den Harnfluss wiederherzustellen und spontanes Wasserlassen zu ermöglichen.



Gerade Spitze Höherer Patientenkomfort

- Kein Ballon
- Weniger Stimulation des Trigons

EFFIZIENT

Vorübergehend	✓
Sofortige Entleerung	✓
Erhöhte Durchflussrate	✓
Reduzierter PVRT	✓

EINFACH ANZUWENDEN

Keine Orientierung nötig	✓
Stabil: Auffächerungen auf beiden Seiten des Sphinkters	✓
Einfache Stententfernung	✓
Keine Anästhesie erforderlich	✓
Geringeres Risiko der MR-Bakterienselektion	✓


PATIENTENKOMFORT

Ambulanter Eingriff	✓
Erhaltung der sexuellen Aktivität	✓
Keine Blasenkrämpfe	✓
Wahrscheinlich verringert sich das Risiko einer CAUTI*, muss durch PMS bestätigt werden**	✓

* Katheter-assoziierte Harnwegsinfektion


** Post Market Surveillance

SCHRITT 4 Kontrolle

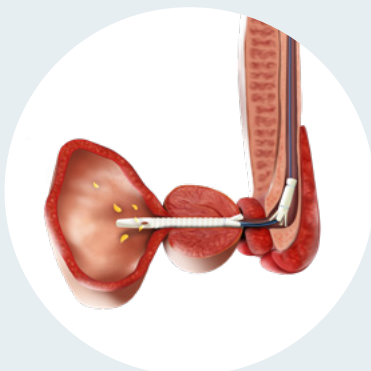

- Kein Urinverlust, wenn der Patient von der Rückenlage in die stehende Position wechselt.
- Sofortige Miktion von klarem Urin.

SCHRITT 5 Entfernen des Stents

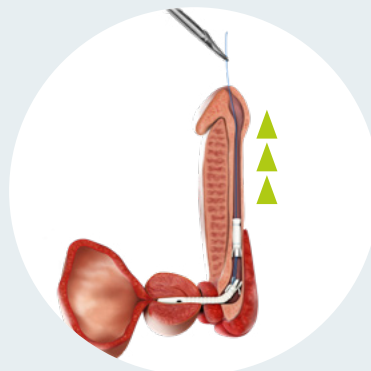

- Ein Anästhesie-Gel in die Harnröhre einträufeln und die Harnröhrenöffnung mit einem 22- oder 24-CH-Bougie erweitern.
- Den Stent vorsichtig am Faden mit einer Pinzette herausziehen.

FEATURES

Einfach einzuführen


Für alle Prostaten

Exzellente Toleranz

Einfach zu entfernen

Alle Komponenten im Set

SOFORT EINSATZBEREIT

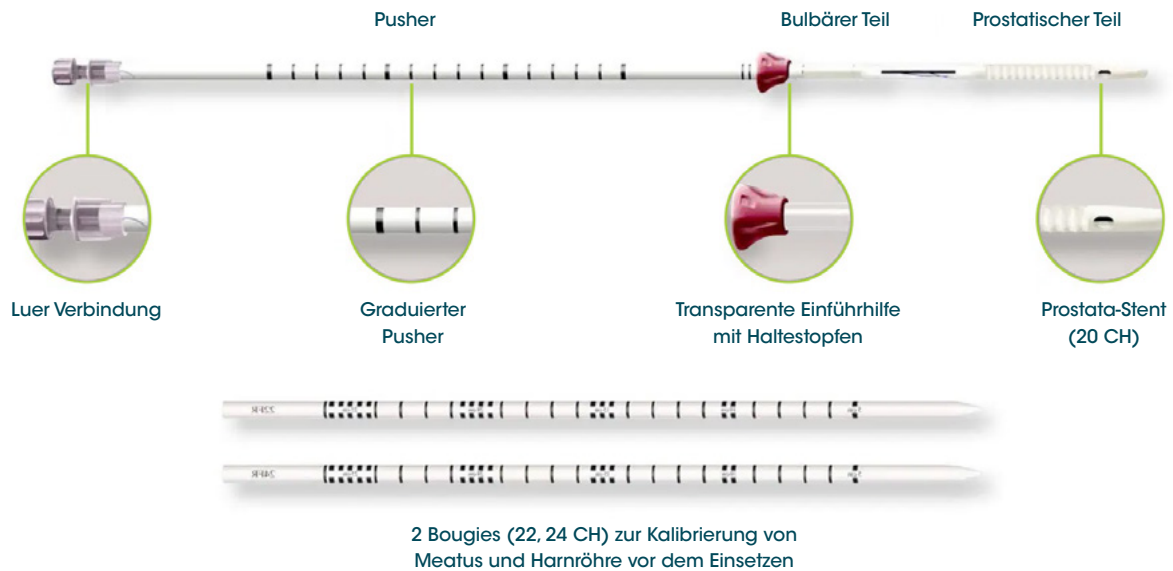

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Bestell-Nr.	Set Komponente	Durchmesser	Länge
ROFV2200ST	Exime Stent	20 CH	Prostatischer Teil: 80 mm Bulbarer Teil: 32 mm
	Pusher	20 CH	300 mm
	Einführhilfe	22 CH	90 mm
	Bougies (2)	22 und 24 CH	300 mm

KONTRAINDIKATIONEN:

- Infektion des Urogenitalsystems, makroskopische Hämaturie mit Blutgerinnseln, Insuffizienz des Harnschließmuskels.
- Erkrankungen des Harnsystems wie Harnröhrenstriktur, falscher urethraler Weg, Blasensteine oder sonstige signifikante Erkrankungen, die die normale Funktion des Produkts beeinträchtigen könnten.
- Abstand zwischen Blasenspitze und -hals größer als 5 cm
- Nicht anwenden nach einer Behandlung, die physikalisch ein Prostataödem und evtl. eine makroskopische Hämaturie hervorruft (hypo-fractionierte Strahlentherapie, Brachytherapie, fokussierter Ultraschall, trans-urethrale Mikrowellen-Thermotherapie...), da der Urin nicht wieder klar wird (mindestens 48h).
- Nicht anwenden, wenn ein solches Verfahren auf Anraten des Arztes dem größeren Interesse des Patienten zuwiderlaufen würde.

WEITERE OPTIMED-HIGHLIGHTS FÜR DIE ENDOUROLOGIE:



Order Code 9997-0027DE
Rev (09/2024) | ©optimed

Distributed by:
optimed Medizinische Instrumente GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 11 | 76275 Ettlingen Germany
Tel. +49 (0) 7243 / 76 33-0 | Fax +49 (0) 7243 / 76 33-624
info@optimed.com | www.optimed.com



CE 0459

Manufactured by:
Rocamed SAM
9 avenue Albert II
98000 Monaco